



MTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test

Model: TD-4531

- Thực hiện dễ dàng
 - Cho kết quả sau 15 phút
 - Hiển thị trực quan
 - Sử dụng chuẩn đoán trong ống nghiệm
 - Không cần thiết bị đặc biệt nào hỗ trợ
 - Hợp tác kỹ thuật của Viện hàn lâm Đài Loan
- REF: <https://iptt.sinica.edu.tw/posts/139911>

NGUYÊN LÝ - HIỆU SUẤT VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Nguyên tắc xét nghiệm:	Xét nghiệm miễn dịch sắc ký miễn dịch
Kháng nguyên đích:	SARS-CoV-2 Protein Nucleocapsid
Loại lấy mẫu	Mẫu tăm bông ngoáy mũi, hầu họng
Giới hạn phát hiện (LoD)	1.26×10^2 TCID ₅₀ cho mL
Phản ứng chéo và gây nhiễu:	Vi rút, vi khuẩn và các yếu tố gây nhiễu được kiểm tra không phản ứng chéo hoặc gây nhiễu
Thời gian xét nghiệm	15 phút
Độ nhạy (PPA):	93.1%, 95% CI: 83% đến 97.2%
Độ đặc hiệu (NPA):	99.6%, 95% CI: 97.7% đến 99.9%

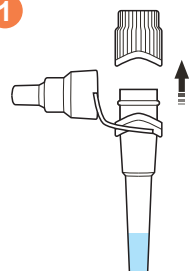
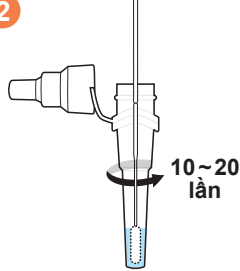
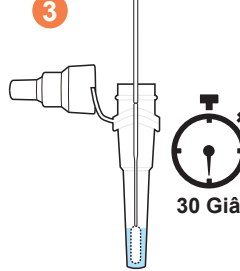
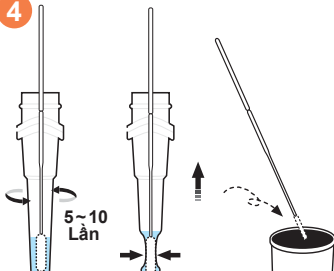
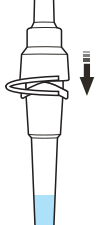
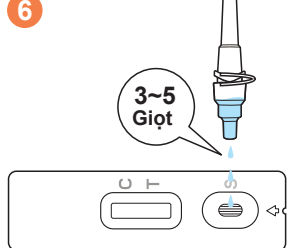
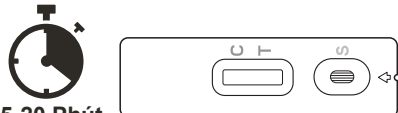
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Số hộp trong 1 thùng	15 hộp
Trọng lượng trên 1 thùng carton	7.15 kg
Kích thước thùng Carton	55.6 (L) X 28.2 (W) X 46.2 (H) cm

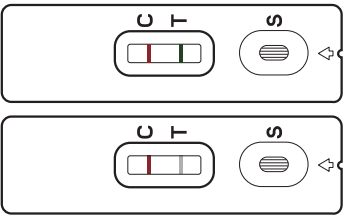
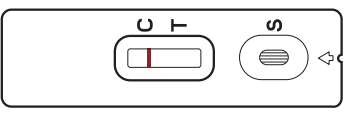
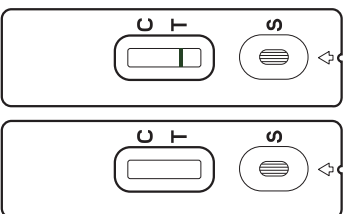
20-Bộ test / Hộp:

1. Thanh phản ứng được đóng gói riêng biệt (20 cái)
2. Ống đậy chiết (20 cái)
3. Tăm bông lấy mẫu vô trùng (20 cái)
4. Hướng dẫn sử dụng chi tiết (1 bản)
5. Hướng dẫn sử dụng nhanh (1 bản)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

<p>1</p>  <p>Lấy và loại bỏ khỏi ống đệm chiết</p>	<p>2</p>  <p>10~20 lần</p> <p>Cho tăm bông vào tiếp xúc với đáy ống đệm chiết, xoay ít nhất mười - hai mươi lần</p>	<p>3</p>  <p>30 Giây</p> <p>Để lưu tăm bông trong ống đệm chiết 30 giây.</p>	<p>4</p>  <p>5~10 Lần</p> <p>Trước khi lấy tăm bông cần ép que vào thành ống để chảy hết đung dịch và cho que tăm vào túi xử lý rác thải y tế.</p>
<p>5</p>  <p>Nhấn chặt nắp gắn vào ống đệm chiết có chứa chất đã qua xử lý</p>	<p>6</p>  <p>3~5 Giọt</p> <p>Nhỏ 3-5 giọt mẫu đã xử lý vào lỗ chứa mẫu.</p>	<p>7</p>  <p>15-20 Phút</p> <p>Kết quả sẽ hiển thị trong vòng 15-20 phút. Đôi khi có thể cho kết quả sớm hơn. Lưu ý: 1. Kết quả không hiển thị thay đổi 20 phút. Có thể cung cấp kết quả sai. 2. Bạn nên đảm bảo đặt que thử trên bàn phẳng.</p>	

HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ

<p>Dương tính</p>		<p>+ Kết quả dương tính: Có hai vạch màu trên băng thử. Cả vạch thử màu và vạch kiểm soát màu đều xuất hiện trên băng thử. Trong thời gian quan sát thấy lốm đốm., một vạch kiểm tra màu xuất hiện được đánh giá là kết quả dương tính.</p>
<p>Âm tính</p>		<p>- Kết quả âm tính: Chỉ có vạch điều khiển màu xuất hiện trên băng thử. Không hiển thị màu của vạch kiểm tra cho thấy kết quả âm tính.</p>
<p>Không hợp lệ</p>		<p>X Kết quả không hợp lệ: Luôn chỉ có một vạch kiểm soát màu trong vùng kiểm soát. Nếu không thấy vạch kiểm soát, hãy làm lại xét nghiệm bằng một xét nghiệm mới</p>